

## **Entnahme von zwei kombinierte Rachen- und Kloakentupfer**

**Zusätzlich notwendig: wasserfester Stift und Tesafilm**

- zwei getrennte Tupfer verwenden
- Zur Entnahme des Rachen-/Trachealtupfers mit dem Tupfer möglichst tief im Rachen unter drehenden Bewegungen die Schleimhaut abstreichen.
- Mit einem weiteren Tupfer in die Kloake eindringen und die Schleimhaut unter drehenden Bewegungen abstreichen.
- Es ist jeweils darauf zu achten mit den Watteträgern nichts anderes zu berühren.
- Die Röhrchen bitte mit wasserfestem Stift für den Rachen-/Trachealtupfer mit **T**, für den Kloakentupfer mit **K**, beschriften.
- Für jeden Vogel die beiden Röhrchen mit Tesafilm fest zusammenkleben und analog zu den Angaben auf dem Probenbegleitschein nummerieren.

**Probenbegleitschein ausfüllen und zusammen mit den Tupferproben, wenn möglich, noch am gleichen Tag über das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) Meißen einsenden!**

Falls das nicht möglich ist, über Nacht gekühlt aufbewahren und am nächsten Morgen dem LÜVA Meißen überbringen.

**Die Probe darf von der Entnahme bis zum Eintreffen im Labor höchstens insgesamt 24 Stunden ohne Kühlung gelagert oder transportiert werden.**

**Bei Kühlung ist die Probe höchstens zwei bis drei Tage lagerbar!**

Probenbegleitscheine und kombinierte Rachen- und Kloakentupfer sind beim LÜVA Meißen erhältlich.